

# Transportboxar

för diagnostiska prover



Transportboxen uppfyller kraven som ställs enligt UN3373 och klarar förpackningsinstruktion P650. Boxen är godkänd av BAM, Berlin, Tyskland som också är tillverkningsland. Transportboxen levereras i standardutförandet med insatsen Neopor. Med Neopor behåller

boxarna temperaturen över 8 timmar. Till boxen finns att köpa avdelare som omöjliggör att proverna kommer i direktkontakt med kylmedian. Boxarna har utrymme för adressmärkning.



#### **Transportbox 3**

Art.nr: 805 904 02

Yttre mått: 210 x 400 x 300 mm\*

Inre mått med Neopor: 145 x 330 x 220 mm\*

Vikt med Neopor: 2,1 kg

Volym: 11,0 liter



#### **Transportbox 4**

Art.nr: 805 904 03

Yttre mått: 315 x 400 x 300 mm\*

Inre mått med Neopor: 250 x 330 x 220 mm\*

Vikt med Neopor: 2,8 kg

Volym: 18,5 liter



#### **Transportbox 5**

Art.nr: 805 904 04

Yttre mått: 420 x 400 x 300 mm\*

Inre mått med Neopor: 350 x 330 x 220 mm\*

Vikt med Neopor: 3,6 kg

Volym: 26,0 liter

\* höjd x längd x bredd

Transportboxen kan plomberas, är stapelbar och har handtag på ovansidan. Transportboxarna kan även hakas fast i varandra och bäras med ett handtag. Vi har även olika lösningar på insatser såsom bl. a. skum som fräses efter kundönskemål. Färgen är ljusgrå.

---

## TRANSPORTBOXAR – TILLBEHÖR



### Avdelare

Art.nr: 805 900 71

Storlek: Anpassad till respektive box

Rengöring/desinfektion:

Desinficerbar

Användning: Avdelare för kylmedia



### Plombering (engångs)

Art.nr: 801 01 225

Storlek: 25 mm

Rengöring/desinfektion:

Ej relevant, engångs

Användning:

Plombering till transportbox



### Etikett

Art.nr: 8330

Storlek: 90x90 mm



### Reservdelslås

Art.nr: 801 01 116

Storlek: 90 mm

Rengöring/desinfektion:

Desinficerbar

Användning:

Reservdelslås till transportbox



### Borrning för plombering

Art.nr: 809 999 07



### Insats EPP

Transportboxen kan även levereras med insatsen EPP. EPP är en insats som är lättare att hålla rent. Kylförmågan är något lägre än Neopren.

## TRANSPORTBOXAR – INSTRUKTION



### Låst läge

Bilden visar hur transportboxen ser ut när den är stängd, ej plomberad.



### Öppet läge

Bilden visar hur transportboxen ser ut när den är i öppet läge.



### Plomberat läge

Bilden visar hur transportboxen ser ut i plomberat läge.




### Kopplat läge

Bilden visar hur transportboxen ser ut när den har kopplats samman med andra transportboxar. Den är även då plomberad.

### Rengöringsinstruktion

Transportboxen är maskindiskbar. Insatsen NEOPOR desinficeras med trasa och desinfektionsmedel.

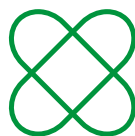

recaremed®